

vita-life® MRT-System **Kontraindikationen**

Bei den Kontraindikationen oder Gegenanzeigen unterscheiden wir zwischen den **absoluten Kontraindikationen** (hier darf das MRT-System unter keinen Umständen angewandt werden) und den **relativen Kontraindikationen**; bei deren Vorliegen darf die Anwendung des MRT-Systems nur unter genauer ärztlicher Kontrolle erfolgen, sowohl zur Therapie des Leidens selber als auch zur allgemeinen Gesundheitsvorsorge.

ABSOLUTE Kontraindikationen sind

- bei Schwangerschaft
- bei Säuglingen
- bei schweren Herzrhythmusstörungen (ab Lown IV b)
- bei elektronischen Implantaten wie z.B. Herzschrittmacher oder Insulinpumpe
- bei akuten Schüben einer Schilddrüsen-Überfunktion
- Epilepsie

RELATIVE Kontraindikationen - Anwendung nur unter ärztlicher Aufsicht!

- Tumorerkrankungen